

MUESTRA SANGRE

Proceso a seguir para la obtención de la muestra

Muestra obligada para pruebas de genética



Procedimiento de la toma de muestra

- Seleccionar el vaso sanguíneo a realizar la extracción.
- Colocar el compresor 5-10 cm por encima del sitio de punción.
- Desinfectar.
- Hacer la extracción y soltar inmediatamente el compresor cuando fluya la sangre.
- Sacar la aguja y aplicar un apósito en la zona afectada.
- Decantar suavemente la sangre dentro de un tubo con EDTA, tapar, mezclar suavemente y etiquetar o rotular con el nombre del paciente o referencia de la solicitud. Mantener la muestra refrigerada.

Recogida de la muestra

- Introducir el tubo en la bolsa de seguridad "SAFETYBAG" asegurando su correcto cierre.
- Colocarlo dentro de un sobre de transporte en el que debe introducir también la solicitud, el consentimiento informado y cuestionario de salud, cuando es preciso según las indicaciones de cada prueba.
- La muestra será recogida en la dirección por Ud. señalada en la Solicitud, tan pronto nos haga saber a recepcion@eugenomic.com indicando que la muestra está disponible para su transporte.