

OBTENTION D'ÉCHANTILLON DE SANG

Procédure à suivre pour obtenir un échantillon

Échantillon requis pour les tests génétiques



Procédure de prélèvement

- Sélectionner le vas sanguin où réaliser l'extraction.
- Colloquez le compresseur 5-10 cm par-dessus l'endroit de ponction.
- Désinfecter.
- Faire l'extraction et lâcher immédiatement le compresseur quand le sang coule.
- Décanter doucement le sang dans le tube avec EDTA, couvrir, mélanger doucement et étiqueter avec le nom du patient ou le code de la demande. Gardez l'échantillon au réfrigérateur.

Recueillir l'échantillon

- Introduire le tube dans un sac de sécurité «SAFETYBAG» en vous assurant de son correcte fermeture.
- Placez-le dans une enveloppe de transport dans laquelle vous devez également entrer dans le formulaire de demande, le consentement informé et le questionnaire de santé, si c'est nécessaire.
- L'échantillon sera prélevé à l'adresse que vous avez indiquée dans la demande. S'il vous plaît laissez-nous savoir a recepcion@eugenomic.com indiquant que l'échantillon est disponible pour le transport.