


MUESTRA TIPS BACTODENT

Proceso a seguir para la obtención de la muestra

Prueba diagnóstica para periodonitis

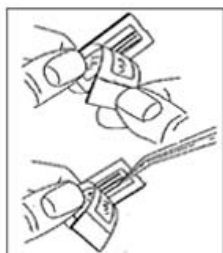


Bolsa con el material de la toma de muestra

- Contiene una cajita con tapa de plástico transparente con cinco “tips” estériles.

Procedimiento de la toma de muestra

- Tirar hacia atrás el borde superior por la zona taladrada sin quitar del todo la cubierta de plástico transparente de forma que prevenga que los “tips” se caigan.
- Las personas que llevan maquillaje o pintura en los labios, previamente deberán retirarla.
- Antes de la toma de muestra, mantener seca el área –encías y dientes- utilizando una gasa estéril. No realizar ninguna limpieza bucal mecánica previa a la toma de muestra.
- Con unas pinzas estériles, tomar un “tip” por el extremo que tiene la línea negra, y la otra punta del mismo, insertarla en el fondo de la bolsa periodontal.
- Repetir esta operación con los cinco “tips” en otras cuatro bolsas periodontales. Mantenerlos durante unos 20-30 segundos.
- Retirar, e introducir con la punta hacia abajo, en el tubo de plástico que lleva la etiqueta “BACTODent”.
- Una vez todos los “tips” estén dentro del tubo, tapar y rotular con el nombre del paciente o referencia de la solicitud.

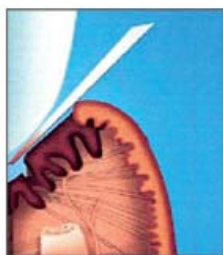

Envío de la muestra

- Introducir la muestra en el sobre acolchado con la dirección de EUGENOMIC.
- Incluir la Hoja de solicitud, debidamente cumplimentada, firmada y etiquetada.
- Recordar escribir en el dorso del sobre acolchado, los datos del REMITENTE.
- Remitir por correo.

