


OBTENTION D'ÉCHANTILLON POUR TIPS BACTODENT

Procédure à suivre pour obtenir un échantillon

Test de diagnostic pour periodonitis

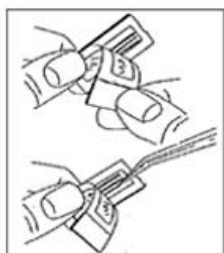


Sac avec le matériel du prélèvement

- Il contient une petite boîte avec un couvercle en plastique transparent avec cinq "tips" stériles.

Procédure de prélèvement

- Tirer en arrière le bord supérieur par la zone percée sans enlever complètement le couvercle en plastique transparent pour prévenir la tombée des "tips".
- Les personnes qui portent du maquillage ou du rouge à lèvres doivent l'enlever préalablement.
- Avant de faire le prélèvement, maintenez l'aire sèche –gencives et dents – en employant une gaze stérile. Ne réalisez aucun nettoyage buccal mécanique avant de faire le prélèvement.
- Avec des pinces stériles, prendre un "tip" par l'extrême qui a la ligne noire, et insérer l'autre extrême du même au fond de la poche parodontale. Répéter cette opération avec les cinq "tips" dans quatre autres poches parodontales. Les maintenir pendant environ 20-30 secondes.
- Retirez-les, et introduisez-les avec l'extrême vers le bas dans le tube en plastique qui porte l'étiquette "BACTODent".
- Une fois vous avez mis tous les "tips" dans le tube, couvrez-le et collez l'étiquette avec le nom ou la référence de la commande.

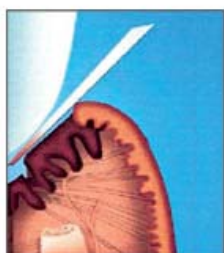

Envoie du prélèvement

- Introduire le prélèvement dans l'enveloppe matelassé avec l'adresse d'EUGENOMIC.
- Inclure la Feuille de sollicitude, complète, signée et étiquetée.
- Une fois complété, ajoutez-le étiqueté, aussi dans l'enveloppe.
- Ne pas oublier d'écrire dans le dos de l'enveloppe matelassé, les données du RÉMITENT.
- Envoyer par courrier.

